

## TEST MICROBIOLOGICO

## TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO

| AGENTI INFETTANTI: |                                       |  |   |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|
| AMBIENTE:          |                                       |  |   |  |  |
|                    | SALA INTERVENTI №1                    |  | ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA                             |  |  |
| PRINCIPIO ATTIVO:  | DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC) |  | LABORATORIO EUROLAB SAS<br>(ACCREDITO <mark>SINAL</mark> Nº 0730) |  |  |
| PRODOTTO           | SEPTAMON HYGIENIO                     |  | 17 novembre 2008  |  |  |
|                    |                                       |  |   |  |  |

| RAPPORTO DI PROVA<br>EUROLAB NUMERO | AMBIENTE                                     | TIPO TRATTAMENTO | MODALITA' PRELIEVO TAMPONI                 | AGENTE INFETTANTE:<br>CARICA BATTERICA TOTALE<br>(UFC/CM^2) | <b>%</b> DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA | AGENTE INFETTANTE:<br>COLIFORMI TOTALI<br>(UFC/CM^2) | <b>9/o DI</b> ABBATTIMENTO  COLIFORMI |
|-------------------------------------|--|------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|
|                                     | SURFACE                                      | TREATMENT        | METHOD                                     | BACTERIAL ACTION<br>(UFC/25CM <sup>2</sup> )                | % ELIMINATED BACTERIAL                    | COLIFORMI ACTION<br>(UFC/25CM <sup>2</sup> )         | % ELIMINATED COLIFORMI                |
| AS79.08/T1                          | COPERCHIO DISTRIBUTORE DISINFETTANTE RIUNITO |                  | PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT   | 12  |   |  |                                       |
| AS79.08/T2                          | COPERCHIO DISTRIBUTORE DISINFETTANTE RIUNITO | STD              | DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE | 0   | 100%                                      |  |                                       |
| AS79.08/T3                          | SUPPORTO CANNULE ASPIRAZIONE                 |                  | PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT   | 28  |   |  |                                       |
| AS79.08/T4                          | SUPPORTO CANNULE ASPIRAZIONE                 | STD              | DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE | 0   | 100%                                      |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |
|                                     |  |                  |  |   |   |  |                                       |

LEGENDA

STD = TRATTAMENTO STANDARD

n.d. =

NON DETERMINABILE

\* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"